

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средства специальные перевязочные

(наименование изделия медицинского назначения)

Atrauman Ag (Атрауман АГ)

Мазевые повязки

1. Назначение:

Для атравматичной обработки ран: ссадины, термические и химические ожоги, пролежни, трофические и диабетические язвы, рваные и скальпированные раны, донорские раны, фиксирование расщепленных трансплантатов.

2. Материал и технические характеристики:

1	Материал	Обработанная серебром полиамидная сетка Пропитка: Не прилипающая мягко действующая мазь Мазь содержит (INCI): Caprylic/Capric/Stearic Triglyceride, Bis-diglyceryl-polyacyladipate-2, Macrogol 2000 Обернута: Бумага типа калька
2	Технические характеристики	Вес покрытия: мин. 140 г/м ²

3. Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость.

4. Подготовка к работе:

Вскрыть стерильную упаковку, достать повязку. Вырезать в соответствии с размером раневой поверхности. Снять защитную бумагу. После использования утилизировать согласно положению по утилизации медицинских отходов.

5. Правила хранения и использования:

Хранить в горизонтальном положении, в сухом месте, при температуре не выше 30° C

1	Срок годности	3 года
2	Методы утилизации	Можно утилизировать на свалках домашнего мусора и отходов согласно действующим правилам
3	Упаковка	Индивидуальная упаковка каждой повязки. Упакованы в транспортные коробки согласно DIN, заклеены липкой лентой и упакованы в Европалеты