

## 1. Основная информация о медицинском изделии

### 1.1 Наименование медицинского изделия

Трусы впитывающие для женщин и для мужчин, страдающих недержанием, MoliCare® Premium Pants (Моликар Премиум Пэнтс) одноразового использования, в вариантах исполнения:

1. Трусы впитывающие для женщин MoliCare® Premium lady pants (Моликар Премиум леди пэнтс) впитываемостью 5 капель, размеры: M, L.
2. Трусы впитывающие для женщин MoliCare® Premium lady pants (Моликар Премиум леди пэнтс) впитываемостью 7 капель, размеры: M, L.
3. Трусы впитывающие для мужчин MoliCare® Premium MEN PANTS (Моликар Премиум МЕН ПЭНТС) впитываемостью 5 капель, размеры: M, L.
4. Трусы впитывающие для мужчин MoliCare® Premium MEN PANTS (Моликар Премиум МЕН ПЭНТС) впитываемостью 7 капель, размеры: M, L.

Здесь и далее по тексту для обозначения данного изделия могут использоваться наименования «изделие», «женские трусы», «мужские трусы» или «медицинское изделие».

### 1.2 Сведения о разработчике медицинского изделия

PAUL HARTMANN AG, Germany (ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ), Германия  
Юридический адрес: Paul-Hartmann-Str. 12, 89522 Heidenheim, Germany (Пауль-Хартманн-Штрассе 12, 89522 Хайденхайм, Германия)  
Тел: +49 7321360, факс: +49 7321363636  
E-mail: [info@hartmann.info](mailto:info@hartmann.info)

### 1.3 Сведения о производителе медицинского изделия

PAUL HARTMANN AG, Germany (ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ), Германия  
Юридический адрес: Paul-Hartmann-Str. 12, 89522 Heidenheim, Germany (Пауль-Хартманн-Штрассе 12, 89522 Хайденхайм, Германия)  
Тел: +49 7321360, факс: +49 7321363636  
E-mail: [info@hartmann.info](mailto:info@hartmann.info)

### 1.4 Сведения об адресах мест производства медицинского изделия

1. PAUL HARTMANN AG Facility Herbrechtingen, Robert-Bosch-Str. 5, 89542 Herbrechtingen, GERMANY
2. PAUL HARTMANN S.A., Z.I. Bois L'Abbesse, 68660 Lièpvre, FRANCE

### 1.5 Назначение медицинского изделия

Медицинское изделие предназначено для впитывания и удерживания мочи и кала у взрослых, страдающих недержанием.

## 1.6 Область применения медицинского изделия

Медицинское изделие предназначено для использования в медицинских учреждениях или в домашних условиях.

## 1.7 Предусмотренные потребители медицинского изделия

Медицинское изделие предназначено для использования квалифицированным медицинским персоналом в домах престарелых, домах инвалидов, при амбулаторной помощи в больницах или непрофессиональными опекунами, опекунами-родственниками в домашних условиях.

## 1.8 Информация о потенциальных пользователях медицинского изделия, меры предосторожности, предупреждения

Предусмотренные пользователи медицинского изделия – мобильные или маломобильные взрослые пациенты с недержанием мочи и кала.

Изделия предназначены только для одноразового использования и должны регулярно меняться по мере необходимости.

## 1.9 Показания, противопоказания и побочные действия

### Показания:

Недержание мочи и кала.

### Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость.

### Побочные действия:

Не выявлены.

## 1.10 Способ применения

Медицинское изделие необходимо использовать в соответствии с инструкцией, представленной ниже.

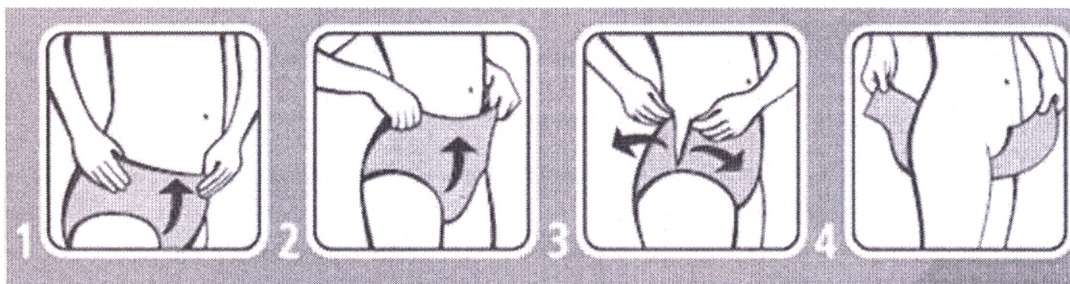


Схема применения изделий Женские/мужские трусы Моликап Премиум (MoliCare Premium)

Примечание: Схема применения напечатана на вторичной упаковке изделия.



Способ применения:

<b>В лежачем состоянии</b>	<b>В положении стоя</b>
Откройте пакет по линии перфорации	Откройте пакет по линии перфорации
Достаньте продукт из пакета	Достаньте продукт из пакета
Задняя часть изделия промаркирована цветной внутренней этикеткой и должна располагаться на внутренней стороне изделия.	Задняя часть изделия промаркирована цветной внутренней этикеткой и должна располагаться на внутренней стороне изделия.
Переверните пациента на бок и подтяните изделие, как обычное нижнее белье, через бедро спереди и сзади, пока оно не будет плотно прилегать к области промежности.	Шагните в изделие, как в обычное нижнее белье. Потяните изделие вверх через бедро и убедитесь, что оно плотно прилегает к области промежности.
Для замены продукта разорвите боковые швы.	Для замены продукта разорвите боковые швы.
Осторожно переверните пациента на бок и удалите изделие по направлению спереди назад.	Снимите изделие по направлению спереди назад.
Выбросьте свернутое изделие в мусорный бак.	Выбросьте свернутое изделие в мусорный бак.

### 1.11 Условия применения

Медицинское изделие предназначено для использования в больнице или в домашних условиях. Изделие должно использоваться в соответствии с его назначением, способом, описанным в инструкции по применению.

### 1.12 Принцип действия

Медицинское изделие состоит из пояса, наружного слоя (полиэтиленовая плёнка с полипропиленовым нетканым слоем), абсорбирующей сердцевины (в основе крафт-целлюлоза), верхнего слоя с манжетами (гидрофильный полипропиленовый нетканый материал) и тесьмы с эластичной резинкой. Компоненты соединены горячим термоклеем.

Таким образом, медицинское изделие способно впитывать мочу и удерживать кал.

### 1.13 Перечень и описание материалов медицинского изделия, вступающих в прямой или косвенный контакт с телом пациента (человеческим телом)

Вид контакта с телом человека - кратковременный (менее 24 часов) контакт с неповрежденной кожей, неповрежденными слизистыми оболочками.



**Примечание:** экстракт алоэ вера, входящий в состав трусов впитывающих для женщин, используется для обеспечения вспомогательного успокаивающего действия при контакте прокладки с деликатной кожей интимной зоны. Таким образом, функциональное назначение медицинского изделия не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека.

#### **1.14 Информация о лекарственных средствах, материалах животного и (или) человеческого происхождения содержащихся в медицинском изделии**

Медицинское изделие не содержит лекарственные средства, материалы животного и человеческого происхождения.

## **2. Описание и технические характеристики**

### **2.1 Внешний вид и описание изделия**

#### **Трусы впитывающие для женщин MoliCare® Premium lady pants (Моликап Премиум леди пэнте):**

Одноразовые урологические трусы с распределительным слоем из скрученного волокна, анатомической формы, с впитывающим слоем, который удерживает запахи. Их внешний слой изготовлен из напоминающего ткань материала, а специально разработанные впитывающие Z-образные манжеты (7 капель) или манжеты без резинки (5 капель), которые надежно защищают от протеканий. В сочетании с анатомически плотной посадкой и эластичными сборками в области ног, эти трусы обеспечивают комфорт при носке в любой ситуации. Они активно защищают кожу от раздражения специальным распределительным слоем из скрученного волокна и поддерживают нейтральный для кожи фактор pH 5,5. Верхний слой трусов дополнительно обработан алоэ вера. Трусы полностью состоят из дышащего нетканого материала, они очень эластичны и удобны в носке. При этом изделие не привлекает к себе внимания, его можно надевать и снимать как обычное нижнее белье.


#### **Трусы впитывающие для мужчин MoliCare® Premium MEN PANTS (Моликап Премиум МЕН ПЭНТС):**

Одноразовые урологические трусы с распределительным слоем из скрученного волокна, анатомической формы, с впитывающим слоем, который удерживает запахи. Внешнее покрытие из похожего на ткань материала, внутренний впитывающий слой, адаптированный к мужской анатомии, и задерживающие жидкость Z-образные манжеты, специально разработанные для этой цели, которые обеспечивают превосходную защиту от протекания. В сочетании с анатомически плотной посадкой и эластичными сборками в области ног эти трусы обеспечивают комфорт при носке в любой ситуации. Они активно защищают кожу от раздражения специальным распределительным слоем из скрученного волокна и поддерживают нейтральный для кожи фактор pH 5,5. Трусы полностью состоят из дышащего нетканого материала, они очень эластичны и удобны в носке. При этом изделие не привлекает к себе внимания, его можно надевать и снимать как обычное нижнее белье.




Конструкция изделия включает в себя (см. рисунок ниже):

- **Каркас /Пояс:** гидрофильный полипропиленовый нетканый «дышащий» материал
- **Наружный слой:** дышащая полиэтиленовая пленка с полипропиленовым нетканым слоем
- **Абсорбирующая сердцевина:**  
1-й слой: 100% крафт-целлюлоза, техн. отбеливание без применения элементарного хлора  
2-й слой: крафт-целлюлоза с суперабсорбирующим полимером  
3-й слой: слой распределения скрученного волокна, сбалансированное значение рН для кожи
- Адгезионный материал:** клей горячего расплава
- **Верхний слой:** белый гидрофильный полипропиленовый нетканый материал
- **Манжеты (барьерные элементы):** белый гидрофильный полипропиленовый нетканый материал (флис)
- **Тесьма с резиновой жилкой:** эластичная резинка для тесьмы у ног, манжет, талии и бедер
- **Информация о продукте:** Печать на внутренней стороне пояса (сзади)

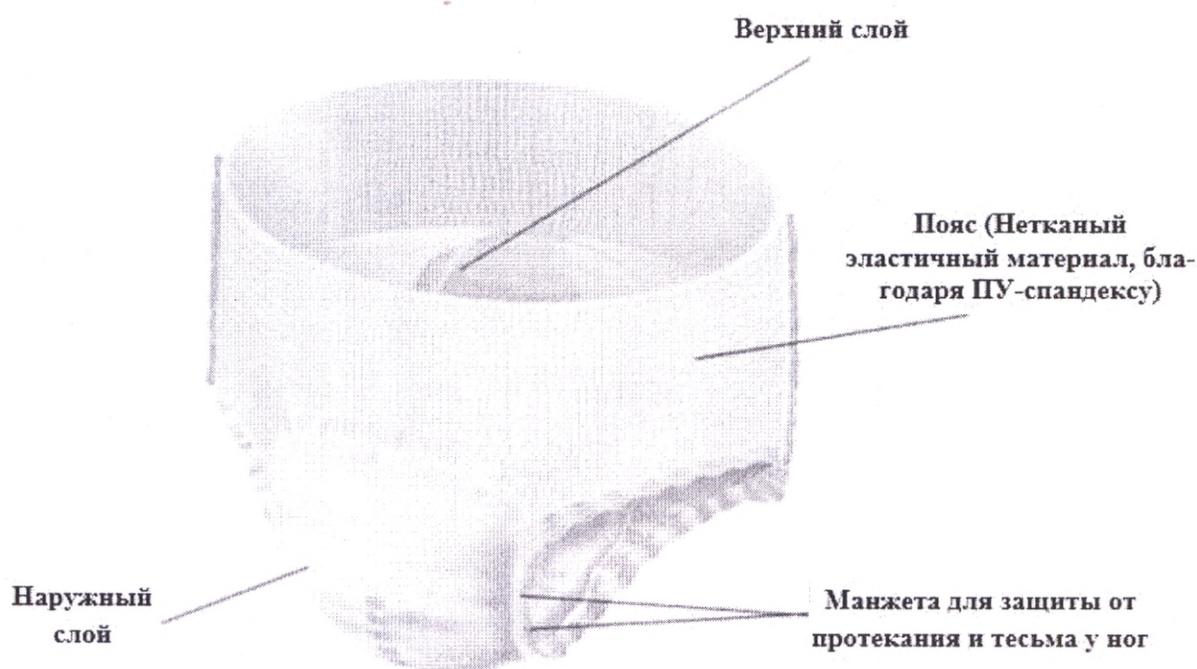

Состав изделия в разрезе представлен на рисунке ниже:

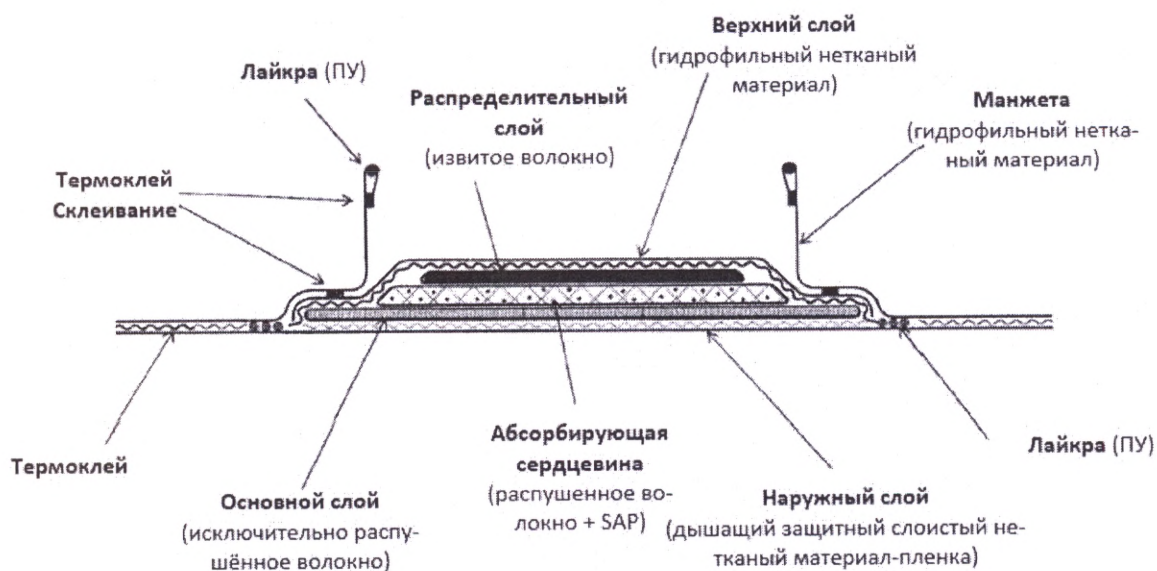

Конструкция впитывающей части включает в себя (начиная со слоя, контактирующего с кожей человека):

- **верхний (наивысший) покрывающий слой** (слой, который непосредственно контактирует с кожей человека и пропускает жидкость внутрь изделия);
- **распределительный слой** (слой, следующий за верхним покровным слоем, который помогает распределить жидкость внутри впитывающей прокладки) (со скрученным волокном);
- **абсорбирующий слой, состоящий из двух абсорбирующих слоев** (внутренний основной слой впитывающей прокладки находится под распределительным слоем, который поглощает и удерживает жидкость внутри изделия) (изготовлен из распушенной целлюлозой и суперабсорбента);
- **наружный (защитный) слой** (слой, который идет после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости из изделия);
- **барьерные элементы** (манжеты для предотвращения попадания жидкости на кожу человека).

Слои и компоненты изделия скрепляют между собой клеем горячего расплава.




## 2.2 Внешний вид и технические характеристики

Ниже на рисунках представлены изображения внешнего вида вариантов исполнения МИ.



*Трусы впитывающие для женщин MoliCare® Premium lady pants (Моликап Премиум леди пэнтс) впитываемостью 5 капель, размеры: M, L.*



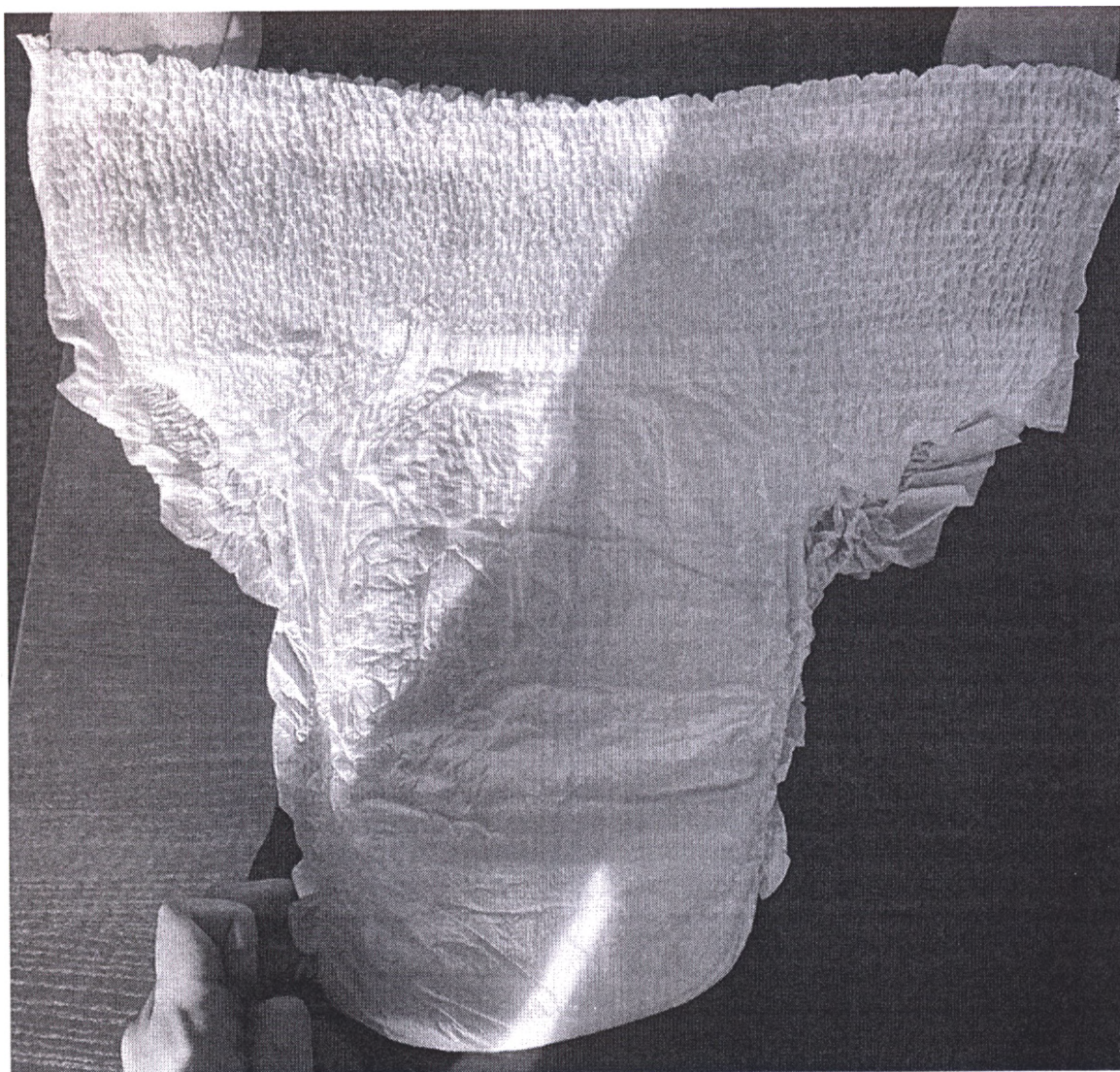

Трусы впитывающие для женщин MoliCare® Premium lady pants (Моликар Премиум леди пэнтс) впитываемостью 7 капель, размеры: M, L.

Ниже в таблице ниже представлены технические характеристики вариантов исполнения МИ для женщин (Моликар Премиум леди пэнтс).

Характеристики вариантов исполнения МИ для женщин

Характеристики	Ед. измер.	Значение	
		5	7
Общая масса (верхний покровный слой, защитные элементы, распределительный слой, верхний впитывающий слой, нижний впитывающий слой, защитный слой, боковая панель).	г	Размер M: 44 г ± 10 % Размер L: 51 г ± 10 %	Размер M: 67 г ± 10 % Размер L: 71 г ± 10 %
Масса впитывающего слоя (распределительный слой, верхний впитывающий слой, нижний впитывающий слой)	г	Размер M: 28 г ± 10 % Размер L: 32 г ± 10 %	Размер M: 49 г ± 10 % Размер L: 49 г ± 10 %



Время впитывания и повторного увлажнения (с 0,9% раствором NaCl)	-		
Время поглощения при 1-м мочеиспускании	с	Размер М: 50 мл: max. 50 Размер L: 50 мл: max. 50	Размер М: 40 мл: max. 50 Размер L: 30 мл: max. 50
Повторное увлажнение при 1-м мочеиспускании	г	Размер М: 50 мл: max. 0,5 Размер L: 50 мл: max. 0,5	Размер М: 40 мл: max. 0,5 Размер L: 30 мл: max. 0,5
Время поглощения при 2-м мочеиспускании	с	Размер М: 50 мл: max. 100 Размер L: 50 мл: max. 100	Размер М: 40 мл: max. 100 Размер L: 30 мл: max. 100
Повторное увлажнение при 2-м мочеиспускании	г	Размер М: 100 мл: max. 5,0 Размер L: 100 мл: max. 5,0	Размер М: 80 мл: max. 5,0 Размер L: 60 мл: max. 5,0
Впитывающий слой, задерживающий жидкость (испытание на центрифуге)	г	Размер М: 220 - 240 Размер L: 255 - 275	Размер М: 285 - 310 Размер L: 240 - 260
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ</b>			
Общая длина	мм	Размер М: 740 ± 10 % Размер L: 780 ± 10 %	Размер М: 730 ± 10 % Размер L: 830 ± 10 %
Ширина	мм	Самая широкая точка: Размер М: 660 ± 10 % Размер L: 810 ± 10 %	Самая широкая точка: Размер М: 660 ± 10 % Размер L: 810 ± 10 %




Ниже на рисунках представлены изображения внешнего вида вариантов исполнения МИ для мужчин (Моликар Премиум МЕН ПЭНТС).



*Трусы впитывающие для мужчин MoliCare® Premium MEN PANTS (Моликар Премиум МЕН ПЭНТС) впитываемостью 5 капель, размеры: M, L.*



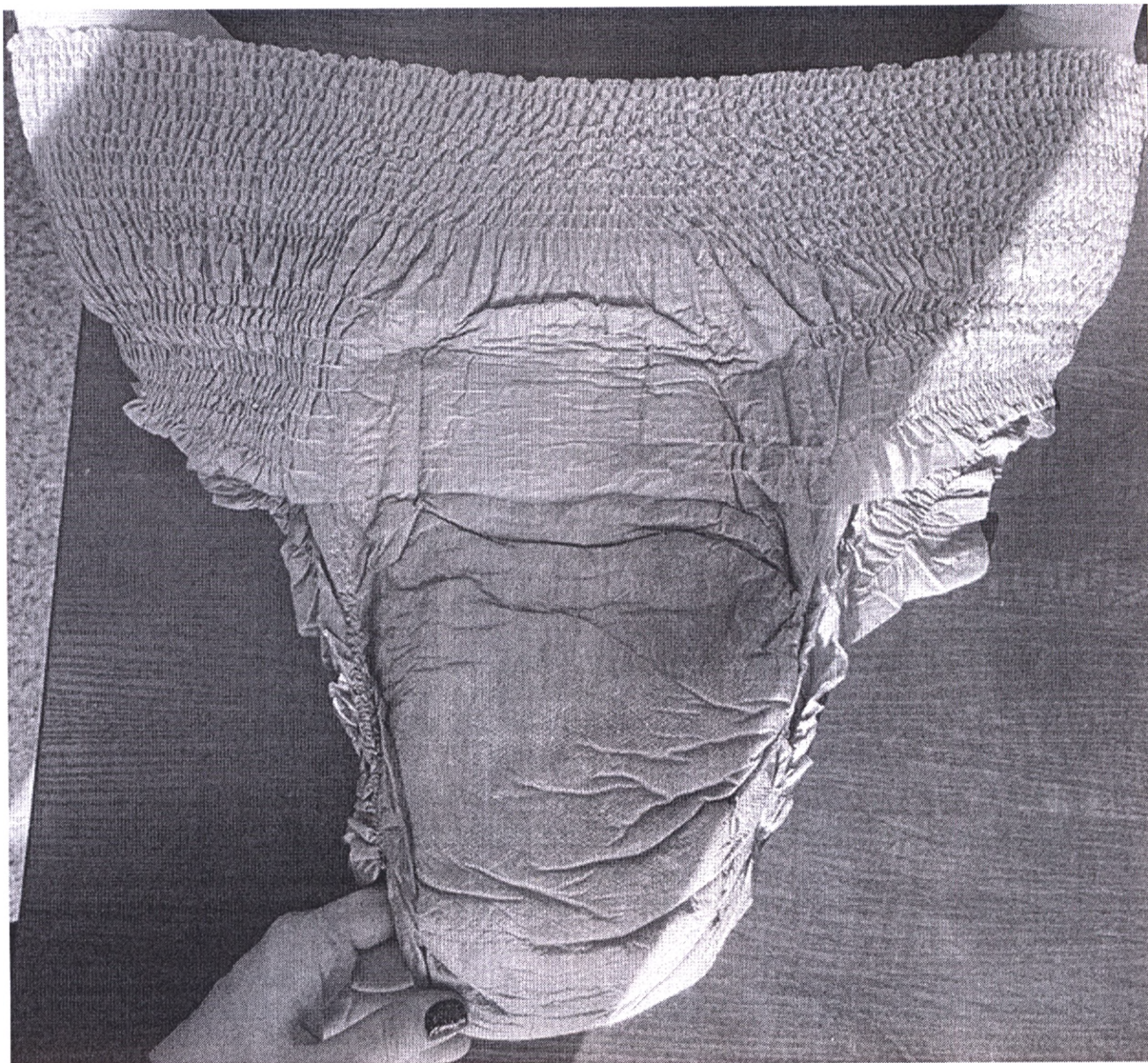

*Трусы впитывающие для мужчин MoliCare® Premium MEN PANTS (Моликар Премиум МЕН ПЭНТС) впитываемостью 7 капель, размеры: M, L.*

Ниже в таблице ниже представлены технические характеристики вариантов исполнения МИ для мужчин (Моликар Премиум МЕН ПЭНТС).

Характеристики вариантов исполнения МИ для мужчин

Характеристики	Ед. измер.	Значение	
		5	7
Степень поглощения			
Общая масса (верхний покровный слой, защитные элементы, распределительный слой, верхний впитывающий слой, нижний впитывающий слой, защитный слой, боковая панель).	г	Размер M: 55 г ± 10 % Размер L: 62 г ± 10 %	Размер M: 65 г ± 10 % Размер L: 71 г ± 10 %
Масса впитывающего слоя (распределительный слой, верхний впитывающий слой, нижний впитывающий слой)	г	Размер M: 36 г ± 10 % Размер L: 37 г ± 10 %	Размер M: 46 г ± 10 % Размер L: 47 г ± 10 %



Время впитывания и повторного увлажнения (с 0,9% раствором NaCl)	-		
Время поглощения при 1-м мочеиспускании	с	Размер М: 50 мл: max. 50 Размер L: 30 мл: max. 50	Размер М: 120 мл: max. 70 Размер L: 90 мл: max. 70
Повторное увлажнение при 1-м мочеиспускании	г	Размер М: 50 мл: max. 0,5 Размер L: 30 мл: max. 0,5	Размер М: 120 мл: max. 0,5 Размер L: 90 мл: max. 0,5
Время поглощения при 2-м мочеиспускании	с	Размер М: 50 мл: max. 100 Размер L: 30 мл: max. 100	Размер М: 120 мл: max. 100 Размер L: 90 мл: max. 100
Повторное увлажнение при 2-м мочеиспускании	г	Размер М: 100 мл: max. 5,0 Размер L: 60 мл: max. 5,0	Размер М: 240 мл: max. 5,0 Размер L: 180 мл: max. 5,0
Впитывающий слой, задерживающий жидкость (испытание на центрифуге)	г	Размер М: 155 - 170 Размер L: 130 -145	Размер М: 375 - 405 Размер L: 355 - 385
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ</b>			
Общая длина	мм	Размер М: 750 ± 10 % Размер L: 850 ± 10 %	Размер М: 750 ± 10 % Размер L: 850 ± 10 %
Ширина	мм	Самая широкая точка: Размер М: 660 ± 10 % Размер L: 810 ± 10 %	Самая широкая точка: Размер М: 660 ± 10 % Размер L: 810 ± 10 %



### 3. Меры предосторожности

Чтобы обеспечить безопасное использование на медицинских изделиях указан следующий гармонизированный символ. Пользователь должен следовать инструкциям на упаковке перед использованием медицинского изделия и будет проинформирован обо всей необходимой информации по безопасности.

Указанная информация о безопасности основана на документации по управлению рисками и применимых технических стандартах:



Не использовать повторно!

### 4. Условия хранения, применения и транспортировки

#### Условия хранения

Медицинское изделие должно храниться в сухом месте при температуре от  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ , в защищенном от прямых солнечных лучей.

При относительной влажности:  $<65\%$ .

#### Условия применения

Медицинское изделие должно применяться в сухом месте при температуре от  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ , в защищенном от прямых солнечных лучей.

При относительной влажности:  $<65\%$ .

#### Условия транспортировки

Транспортировать изделия можно всеми видами транспорта под крышей (в железнодорожных вагонах, контейнерах, трюмах, отапливаемых помещениях с подогревом, отсеках, в самолетах, закрытых вагонах и т.д.) в соответствии с правилами перевозки, действующими для каждого вида перевозки.

Температура транспортировки: от  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Относительная влажность:  $<65\%$

### 5. Срок годности

Срок годности медицинского изделия составляет 5 лет с даты изготовления. С целью обеспечения соответствующего предела безопасности дата истечения срока годности округляется до начала месяца, в котором было произведено медицинское изделие.

### 6. Очистка и дезинфекция

Неприменимо. Одноразовое медицинское изделие.

## 7. Сведения о маркировке медицинского изделия и его упаковке

На изделие под этикеткой на задней стороне пояса нанесен код партии (LOT).

Ниже представлен проект маркировки первичной упаковки на русском языке:

**Трусы впитывающие для женщин и для мужчин, страдающих недержанием, MoliCare® Premium Pants (Моликар Премиум Пэнтс) одноразового использования, в вариантах исполнения: Вариант исполнения - Трусы впитывающие для женщин MoliCare® Premium lady pants (Моликар Премиум леди пэнтс) впитываемостью 5 капель, размер: М.**

Состав: полипропиленовый нетканый материал, алоэ вера, термохимически обработанная распушенная целлюлоза со скрученными волокнами, суперабсорбент, термохимически обработанная распушенная целлюлоза, отбеленная без применения хлора, полипропиленовая пленка, термоплавкий клей.

### НЕТОКСИЧНО

Назначение/применение: Медицинское изделие предназначено для удержания и впитывания мочи и кала у взрослых.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость

Размер и форма выпуска указаны на упаковке.

Производитель: «ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ», Пауль-Хартманн-Штрассе, 12, 89522 Хайденхайм, Германия.

Место производства: PAUL HARTMANN AG Facility Herbrechtingen, Robert-Bosch-Str. 5, 89542 Herbrechtingen, GERMANY

Произведено: в Германии

Уполномоченный представитель/Импортер: ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», 115114, Москва, ул. Кожевническая 7, стр. 1. Горячая линия: 8-800-505-12-12 бесплатно по РФ. Претензии потребителей принимаются импортером.

Годен до: см. на упаковке. Срок годности: 5 лет.

Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от - 18°C до + 50°C.

Относительная влажность: < 65%

По истечении срока годности товар подлежит утилизации.

Рег.Уд. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ .

Инструкция по применению доступна для скачивания по ссылке: <https://hartmann-shop.ru/>

Примечание: русскоязычная маркировка не перекрывает оригинальную!

В таблице ниже приведена расшифровка символов, указанных на маркировке и упаковке медицинского изделия.

Расшифровка символов

Символ	Описание	Упаковка
	Производитель	Первичная и вторичная
	Не использовать повторно	Первичная и вторичная
	Зелёная точка	Первичная и вторичная
	Не бросать в туалет	Первичная и вторичная



	Triman - подлежит вторичной переработке (только французское требование)	Первичная
	21 PAP — Другой картон	Первичная
	20 PAP — Гофрированный картон	Вторичная
	4 LDPE — Полиэтилен низкой плотности	Первичная
	Упаковку следует выбросить в урну	Первичная и вторичная
	Беречь от влаги	Первичная и вторичная
	Маркировка CE в соответствии с Директивой 93/42/ЕЭС о медицинских приборах с последующими изменениями и дополнениями. Номер Уполномоченного органа – 0546.	Первичная и вторичная
	Каталожный номер	Первичная и вторичная
	Номер партии	Первичная и вторичная
	Не вскрывать лезвием	Вторичная
	Медицинское изделие	Первичная и вторичная
 (date, month, year)	Дата производства	Первичная и вторичная
 (date, month, year)	Дата истечения срока годности	Первичная и вторичная
	Обозначение степени впитывания	Первичная и вторичная
<b>НЕТОКСИЧНО</b>	Обозначение нетоксичности изделия	Первичная

## 8. Список национальных и международных стандартов

Список применяемых стандартов приведен в таблице ниже.

Список применяемых стандартов

№.	Нормативный документ	Наименование
1.	EN ISO 13485:2016	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования.
2.	EN ISO 14971:2012	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям.
3.	IEC 62366-1:2015	Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности.
4.	MEDDEV 2.7.1 rev 4	Клиническая оценка: руководство для производителей и компетентных органов в соответствии с директивами 93/42/ЕЕС и 90/385/ЕЕС.
5.	ISO 10993-1:2018	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследование
6.	EN 1041:2008	Информация, предоставляемая производителем медицинских изделий
7.	EN ISO 15223-1:2016	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.
8.	ISO 15621:2017	Впитывающие средства при недержании мочи и/или кала - Общие рекомендации по оценке.

## 9. Ссылки на предыдущие модификации медицинского изделия или аналогичные модификации медицинских изделий в обращении

Медицинское изделие сконструировано аналогично типу, качеству и материалам ранее зарегистрированному медицинскому изделию: Подгузники для взрослых и подростков, страдающих недержанием, воздухопроницаемые («дышащие») (регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09379 от 02.02.2017).

## 10. Требования к обслуживанию и ремонту медицинского изделия, гарантия

### Гарантия:

Медицинское изделие было разработано, изготовлено, испытано и упаковано с максимальной степенью предосторожности. PAUL HARTMANN AG гарантирует качество использования изделия до истечения срока его действия, при условии, что упаковка не была повреждена или вскрыта.

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с гарантиями производителя, обращайтесь к уполномоченному представителю производителя в России – ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН».



### **Техническое обслуживание и ремонт:**

Неприменимо, одноразовое медицинское изделие.

### **11. Порядок и условия утилизации или уничтожения медицинского изделия**

Утилизация класса А – утилизируйте медицинское изделие вместе с обычным больничным или бытовым мусором в соответствии с местными нормативными требованиями.

Чтобы свести к минимуму риск потенциальных инфекционных заболеваний или загрязнения окружающей среды, медицинское изделие не следует выбрасывать в унитаз.

### **12. Наименование и юридический адрес производителя и уполномоченного представителя производителя**

#### **Производитель:**

PAUL HARTMANN AG, Paul-Hartmann-Str. 12, 89522 Heidenheim, Germany (Пауль-Хартманн-Штрассе 12, 89522 Хайденхайм, Германия)

#### **Уполномоченный представитель производителя в России:**

ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр.1,

телефон +7 (495) 796 99 61, факс. +7 (495) 796 99 60,

электронная почта: [reception.ru-mos@hartmann.info](mailto:reception.ru-mos@hartmann.info)

### **13. Информация о версии инструкции по применению**

Версия 1.0