

Инструкция по применению

Прокладки урологические для женщин «МолиМед» по ТУ 17.22.12-004-47580861-2020:

- МолиМед Классик, трех типоразмеров: Мини, Миди, Макси.
- МолиМед Премиум, трех типоразмеров: Мини, Миди, Макси

Показания к применению: Прокладки урологические для женщин «МолиМед» предназначены для использования при легкой степени недержания мочи, а также после вагинальных оперативных вмешательств, во время беременности и в послеродовой период. Прокладки могут применяться в клинических, поликлинических учреждениях и в домашних условиях лицами женского пола, страдающих неспособностью удерживать мочу или непроизвольно теряющих капли мочи при расстройствах ее удержания, а также после вагинальных оперативных вмешательств, во время беременности и в послеродовой период. Прокладки предназначены для однократного применения

Описание: Прокладки урологические для женщин «МолиМед» представляют собой комбинированные изделия с закругленными краями и боковыми бортиками для дополнительной защиты от промокания, включающие следующие составные части конструкции (начиная со слоя, контактирующего с кожей): верхний покровный слой, верхний, средний и нижний абсорбирующие слои, защитный слой, фиксирующий слой и антиадгезионный слой. Слои изделия скреплены с помощью термообработки клеем горячего расплава.


Размеры:

Наименование показателя	МолиМед Премиум/МолиМед Классик		
	Мини	Миди	Макси
Общая длина, мм (А)	270±6	335±8	450±10
Общая ширина, мм (Е)	135±8	160±8	200±8
Длина абсорбирующего слоя, мм (В)	240±10	305±10	405±10
Ширина абсорбирующего слоя (в широкой части), мм (F)	105±8	130±8	160±8

Классификация влагопоглощения:

Типоразмер	Молимед Премиум/ Молимед Классик		
	Мини	Миди	Макси
Общее влагопоглощение, мл	<400 мл	от 400 до 600 мл	от 850 до 1100 мл
Общее влагопоглощение по количеству капель			

Рисунок 1

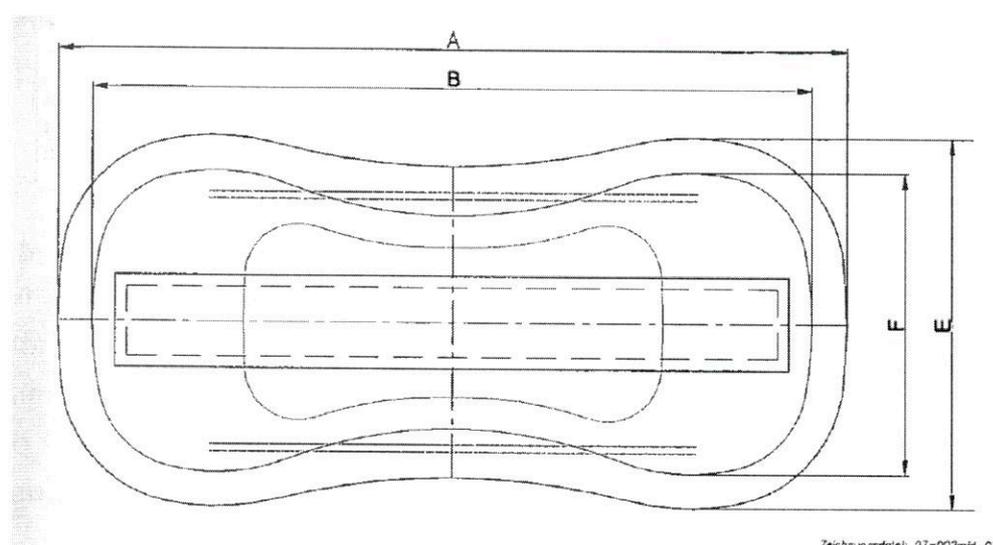

Zeichungsdatei: 07-002mid-02

Рисунок 1. Обозначение размеров прокладок.

A – Общая длина, мм; B – Длина абсорбирующего слоя, мм; E – Общая ширина, мм;
F – Ширина абсорбирующего слоя, мм.

Состав: верхний покровный слой (соприкасается с кожей и, кратковременно, со слизистыми оболочками) состоит из полипропиленового нетканого материала; верхний абсорбирующий слой из распушенной целлюлозы со скрученными волокнами, который поглощает жидкость и способствует ее равномерному впитыванию внутри прокладки, средний абсорбирующий слой из распушенной целлюлозы с равномерно распределенным в нём суперабсорбирующим полимером (суперабсорбентом), который поглощает и удерживает впитываемую жидкость;

- нижний абсорбирующий слой из распушенной целлюлозы, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость;

- защитный слой предотвращает появление жидкости на белье;

- фиксирующий клеевой слой, который нанесен на защитный слой для фиксации прокладки на белье;

- антиадгезионный слой, который закрывает фиксирующий слой.


Слои изделия скреплены термоплавким клеем с помощью термообработки.

Изделие снабжено бортиками, стянутыми эластомерными полиуретановыми нитями (лайкра), которые предотвращают боковое стекание мочи.

Порядок применения:

Медицинское изделие необходимо использовать в соответствии с инструкциями, представленными ниже.

Схема применения женских прокладок:

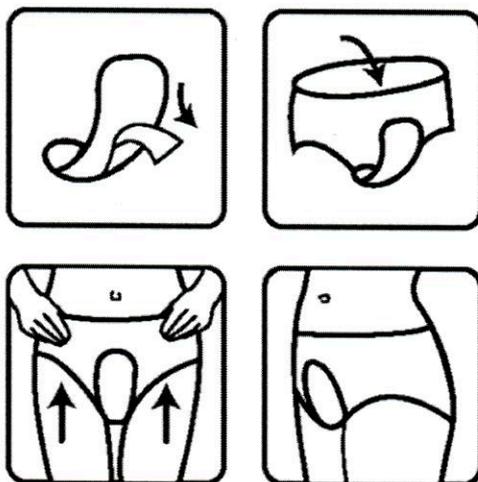

Способ применения:

Вскрыть упаковку по перфорации на пакете, извлечь прокладку, развернуть и распрямить ее, удалить антиадгезионный слой с прокладки – силиконовую бумагу, зафиксировать прокладку с помощью фиксирующего слоя на нижнем белье. После использования прокладку нельзя выбрасывать в канализацию.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Меры предосторожности: Прокладки предназначены только для наружного применения. Не использовать при повреждении упаковки. Не использовать повторно.

Хранение: Прокладки урологические для женщин «МолиМед» должны храниться в следующих климатических условиях: температура от +5..до +40°C, влажность: 30-80 %, давление 650-800 мм.рт.ст. (86,6-106,7 кПа).

Транспортирование: Прокладки урологические для женщин «МолиМед» должны выдерживать транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта при следующих условиях: температура: +50..-50°C, влажность: 30-80 %, давление 650-800 мм.рт.ст. (86,6-106,7 кПа).

Гарантия изготовителя: По вопросам качества медицинского изделия «Прокладки урологические для женщин МолиМед» по ТУ 17.22.12-004-47580861-2020», производства ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», Россия, обращаться по адресу:

Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр.1, Тел.: +7(495) 796 99 61,
Бесплатная горячая линия: 8-800-505-12-12, reception.ru-mos@hartmann.info

Производитель гарантирует соответствие прокладок требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий применения, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями и инструкцией по применению

В случае возникновения дискомфорта при использовании прокладок, раздражения или покраснения, а также других неблагоприятных случаев обратиться к специалисту.

В случае наступления нежелательного события, имеющего признаки неблагоприятного явления (инцидента) информацию о событии направлять производителю ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», Россия, по адресу:

Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр.1, Тел.: +7(495) 796 99 61,
Бесплатная горячая линия: 8-800-505-12-12, reception.ru-mos@hartmann.info

Гарантийный срок годности прокладок - 5 лет со дня изготовления.

Сведения об утилизации:

Утилизация должна проводиться согласно правилам и нормативам СанПиН 2.1.3684-21.

Прокладки после использования должны утилизироваться местными публично-правовыми организациями как отходы класса Б, в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

Прокладки с нарушением герметичности упаковки, с истекшим сроком годности, не использованные после вскрытия упаковки, должны утилизироваться местными публично-правовыми организациями как отходы класса А, в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.