



Соединение фитнес-трекера с приложением Medi.Connect

Шаг 1



Запустите приложение Veroyal® medi.connect на вашем смартфоне и введите ваш логин и пароль. Если у вас нет логина и пароля – нажмите на кнопку «регистрация».


Активируйте Bluetooth на телефоне. Если он уже у вас включен, активируйте поиск новых устройств.




Шаг 2



Теперь найдите внизу экрана иконку «настройки» ...

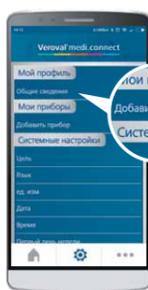

... и нажмите «Добавить устройство» в разделе «Мои устройства» ...

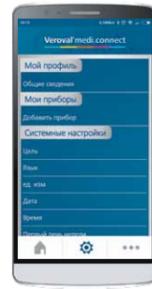

Добавьте в приложении фитнес-браслет. (этот шаг нужно сделать только один раз)



Шаг 3

В «Выборе устройства», выберите «Фитнесс-браслет»...



... На экране появится изображение фитнес-браслета. Нажмите внизу экрана «Соединение с фитнес-браслетом»

Шаг 4



Найдите на торце фитнес-браслета кнопку и нажимайте на нее до тех пор, пока не переключитесь на режим отображения часов. Затем зажмите и держите данную кнопку до тех пор, пока не возникнет надпись на дисплее «Соединение?». Отпустите кнопку.



И нажмите быстро еще раз на кнопку выбора режимов на торце фитнес-браслет для подтверждения соединения.




Начнется установка соединения фитнес-браслета с телефоном. На экране надпись «Соединение» будет мигать.



Шаг 5

Перейдите в пункт «Установить соединение» в программе Veroyal® medi.connect на смартфоне...

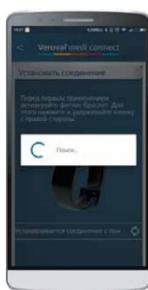

... И поиск фитнес-браслета активизируется.



Если соединение не будет установлено в течение 30 секунд, то вы увидите значок X на экране фитнес-браслета и устройство перейдет в автономный режим

В этом случае, повторите процесс подключения, начиная с шага 1.

Если данные с фитнес-браслета не поступают в смартфон, возможно память для Bluetooth данных на телефоне переполнена (это возможно только на смартфонах с операционной системой Android.)

В этом случае, пожалуйста, сделайте следующее:

1. Выключите Bluetooth на телефоне.
2. Выключите телефон и включите его снова.
3. Очистите память Bluetooth: зайдите в настройки > Приложения > «Bluetooth» > «Очистить память» (Внимание, эти шаги могут варьироваться, в зависимости от модели смартфона).
4. Включите Bluetooth на смартфоне снова и повторите соединение с фитнес-браслетом.



В случае удачного соединения фитнес-браслета с смартфоном на дисплее появится знак «галочка».




Шаг 6

Теперь вы можете установить персональные цели и эти данные ...



... синхронизируются с показаниями вашего фитнес-браслета. Нажмите в программе Veroyal® medi.connect в разделе «Фитнесс-трекер» добавить устройство.

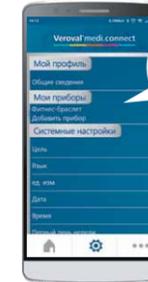

Фитнесс-браслет появится в разделе «Ваши устройства» в настройках программы Veroyal® medi.connect



... и данные фитнес-браслета будут отображаться в приложении Veroyal® medi.connect.



Veroyal® medi.connect

1 щелчок мыши для контроля вашего здоровья



Программа Veroval® medi.connect: Один щелчок мыши для управления вашим здоровьем.

Точно записывать ваши жизненно важные признаки, такие как кровяное давление или вес, проста с устройства Veroval®. Но как могут эти ценности быть легко хранить, анализировать, сравнивать друг с другом или совместно с вашим врачом?

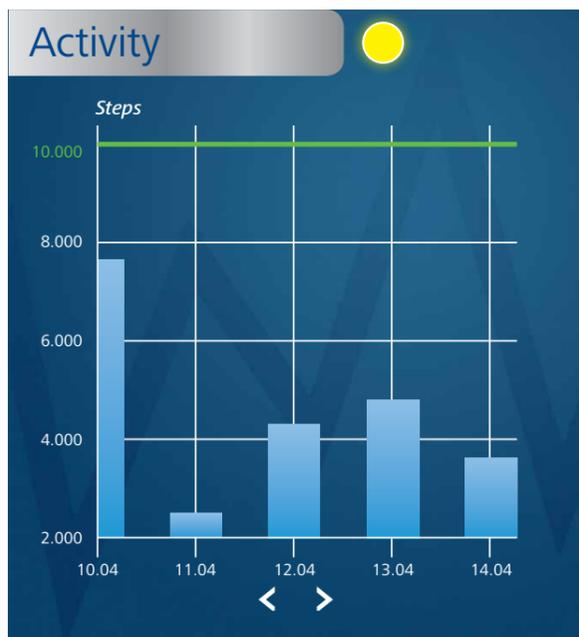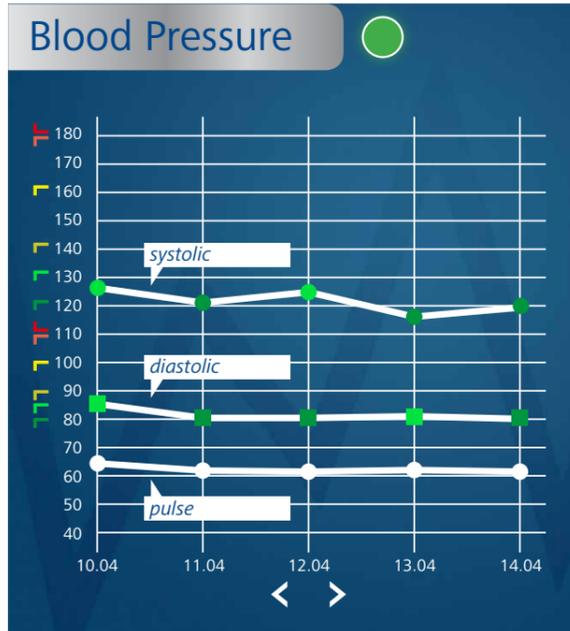

Программа Veroval medi.connect – передача данных от различных приборов Veroval®

Бесплатное приложение Veroval® medi.connect имеет широкий набор функций для анализа различных приборов Veroval®. С помощью поставляемого в комплекте USB-кабеля или посредством Bluetooth модуля можно быстро и легко передавать ваши измерения на компьютер, где вы можете выбрать различные аналитические периоды (день, неделя, месяц), чтобы автоматически создать отчеты по вашим данным.

Приложение для компьютера Veroval® medi.connect – удобное хранение и управление данными вашего здоровья

Вы можете загрузить бесплатное программное обеспечение на свой компьютер на сайте <https://veroval-mediconnect.info/>. Или вы можете зарегистрироваться в Интернете и получить доступ к веб-сайту Veroval® medi.connect на любом компьютере (через облачный сервис).

Программа поможет вам правильно оценить измеренные значения и сравнивать данные от разных устройств. Все результаты можно распечатать для своего врача или отправить по электронной почте с помощью всего нескольких движений мышью.

Приложение Veroval® medi.connect для телефона – передача и анализ данным фитнес-трекера Veroval®

Также вы можете скачать приложение Veroval® medi.connect (из Apple iTunes Store или Google Play Store) на свой мобильный телефон. Теперь вы можете подключить фитнес-браслет Veroval® и начать собирать и анализировать данные.



Veroval® medi.connect



Передача данных через USB кабель или USB-blue tooth адаптер



Передача данных через Bluetooth

Приложение для смартфона: Совместимость с iOS /Android



Опционально: Передача данных



Бесплатная программа Veroval® medi.connect (Windows PC)1

Бесплатная программа Veroval® medi.connect (Windows PC)1



Сайт с возможностью анализа и хранения данных

ООО ПАУЛЬ ХАРТМАНН
115114, г. Москва, Кожевническая ул., д.7, стр.1.
ОГРН 1027700057010
телефон (495)796-9961;
факс (495)796-99-60

Бесплатная горячая линия ПАУЛЬ ХАРТМАНН:
8-800-505-12-12 (круглосуточно).