

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

### **Бинт фиксирующий эластичный, самофиксирующийся Reha-haft (Пеха-хафт)**

#### **Производитель:**

«Пауль Хартманн АГ» (Paul Hartmann AG)  
Paul-Hartmann-Straße 12, 89522 Heidenheim, Germany  
Телефон: +49 7321360, факс: +49 7321363636

#### **Размеры**

Reha-haft (Пеха-хафт), размеры (длина в растянутом состоянии): 4 см х 4 м, 6 см х 4 м, 8 см х 4 м, 10 см х 4 м, 12 см х 4 м, 4 см х 20 м, 6 см х 20 м, 8 см х 20 м, 10 см х 20 м, 12 см х 20 м, 2,5 см х 4 м.

#### **Свойства**

Это фиксирующий эластичный, самофиксирующийся бинт, который благодаря двойному эффекту сцепления, не требует завязывания и обеспечивает надежную фиксацию. Растяжимость около 85%. Благодаря когезивности особенно экономичен в использовании, всего несколько оборотов обеспечивают надежную фиксацию, бинт прилипает только к бинту. Пропускает воздух, не раздражает кожу, хорошо держит форму, может быть стерилизован паром. Цвет – белый, синий, красный.

#### **Назначение/Область применения**

Для фиксации повязок всех видов, в особенности на суставах, а также частях тела, имеющих коническую или округлую форму

**Состав:** 43% вискоза, 37% хлопок, 20% полиамид

#### **Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость

#### **Возможные побочные действия**

Не выявлены

#### **Транспортировка**

Данное медицинское изделие можно транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте каждого вида.

Условия окружающей среды:

Температура: от -50°C до +50°C

Относительная влажность воздуха: от 15% до 90% (без образования конденсата)

## СИМВОЛЫ НА МАРКИРОВКЕ

	Производитель
	Не использовать повторно
	Пригоден для переработки
	Прочий картон
	Не допускать воздействия солнечного света
	Не содержит латекс
	Использованную упаковку выкинуть в урну
	Беречь от влаги
	Каталожный номер
	Лот
	Дата истечения срока годности

### Хранение и срок годности

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5°C до +30°C  
Срок хранения – 3 года с даты производства

### Утилизация

Изделие после истечения срока годности подлежит утилизации как бытовые отходы или как медицинские отходы Класса А (согласно требованиям СанПин 2.1.7.2790-10)

### Техническое обслуживание и ремонт

Не применимо к данному медицинскому изделию

### Гарантийные обязательства

Пауль Хартманн АГ гарантирует, что данный продукт был произведен и упакован с должной аккуратностью, предписанной в Директиве ЕС 93/42/ЕЕС для медицинского изделия. Компания заменит любое медицинское изделие, в случае обнаружения дефектов, допущенных в ходе производства и упаковки (доказательства должны быть предоставлены), и сообщения о таких дефектах в компанию или ее дистрибьюторам. Ответственность в отношении изделия



прекращается, если возникло любое повреждение, вызванное транспортировкой, хранением или ненадлежащим обращением, а также другими факторами за пределами контроля производителя.

**Уполномоченный представитель на территории РФ**

ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН»

Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр.1

Телефон: (495) 796 99 61, факс (495) 796 99 60

E-mail: [Reception.ru-mos@hartmann.info](mailto:Reception.ru-mos@hartmann.info)